

# Verfügbarmachen Ihres AEDs

Wir freuen uns, dass Sie darüber nachdenken, Ihren vorhandenen AED für Ersthelfer im Umkreis verfügbar zu machen. Im Zusammenspiel mit unserem Lebensretter-System machen Sie damit einen großen Bereich um den AED „herzsicher“. Das wird viel wahrscheinlicher ein Menschenleben retten, als wenn der AED nur in Ihrem Betrieb/Verein vorgehalten wird. 50% der Herz-Kreislaufstillstände ereignen sich außerhalb von Geschäftszeiten. Pro 100m Entfernung zu einem AED sinkt die Überlebenschance um 10%. Und es wird Ihnen bereits mittelfristig einiges an Geld und Aufwand sparen.

## Was müssen Sie wissen?

Als Betreiber eines AEDs sind Sie von Gesetzes wegen Medizinproduktebetreiber und unterliegen entsprechend den Regelungen des Medizinproduktebetreibergesetzes. Dieses schreibt unter anderem vor, dass ein AED

- einmal im Jahr (spätestens alle zwei Jahre) einer sog. Sicherheitstechnischen Kontrolle (STK) unterzogen werden muss. Dies erledigt i.d.R. ein externes Unternehmen kostenpflichtig.
  - einer regelmäßigen Sichtprüfung<sup>1</sup> unterzogen werden muss. Diese muss im Medizinproduktebuch (sozusagen das Servicebuch des AEDs) dokumentiert werden.
  - am Standort eindeutig mit vorgeschriebenen Rettungszeichen gekennzeichnet wird.
- ⚠ Viele moderne AEDs sind „wartungsfrei“ und herstellereitig von der STK befreit. So lange der AED nur innerbetrieblich zugänglich ist, gilt auch für wartungsfreie Geräte die STK-Verpflichtung. Wenn Sie Ihren AED hingegen 24/7 öffentlich verfügbar installieren, entlässt Sie der Gesetzgeber aus der Verpflichtung zur STK. Über die entfallenden Kosten der STK holen Sie die Kosten für eine gut sichtbare Außenanbringung schnell wieder herein.<sup>2</sup> Wir empfehlen, den AED zu versichern.

## Wie unterstützen wir Sie?

- ✓ Wir beraten Sie ausführlich per Telefon und E-Mail bei der Auswahl eines geeigneten Standortes. Nennen Sie uns einfach die designierte Installationsadresse und schicken Sie einige Fotos mit.
- ✓ Sie beziehen als Set eine gut sichtbare, beheizte und beleuchtete Box zur Außenanbringung mit dazugehöriger Hinweistafel über uns. Die Lieferung erfolgt per UPS i.d.R. innerhalb von 3 Arbeitstagen. Bestell- und Rechnungsadresse dürfen hierbei abweichen.
- ✓ Diese Hinweistafel über der Box, die Sie als Betreiber ausweist, wird völlig individuell für Sie vom Grafiker gestaltet.
- ✓ Wir übernehmen für Sie die Dokumentation im Medizinproduktebuch in einer DSGVO-konformen Cloud-Anwendung, jederzeit exportierbar.<sup>3</sup>
- ✓ Die regelmäßige Sichtprüfung entfällt für Sie.<sup>3</sup>
- ✓ Wir legen Ihren AED in der Defi-Map Datenbank in der Rettungsleitstelle an, sodass unsere registrierten Ersthelfer im Fall eines Herz-Kreislaufzustandes in der Nähe Ihres AEDs automatisiert zu Ihrem AED geroutet werden.
- ✓ Wir wickeln Ihre Bestellung als Spende ab. Eine Spendenbescheinigung stellen wir aus.



Beispielbild mit der im Set enthaltenen Hinweistafel über der Box (Betreiberkontakt) und einer weiteren Tafel, zusätzlichen unter der Box (nicht im Set enthalten).



<sup>1</sup> Der Gesetzgeber definiert „regelmäßig“ nicht mit einem bestimmten Zeitraum. Es gibt aber Gerichtsurteile, die nahelegen, dass ein Zeitabstand von 14 Tagen noch in Ordnung ist, ein Abstand von vielen Wochen oder gar Monaten nicht.

<sup>2</sup> Auch bei älteren, wartungsfreien AEDs ist es nicht falsch, die STK in regelmäßigen Abständen durchführen zu lassen. Diese sind aber durch Sie frei wählbar.

<sup>3</sup> Nur wenn die SIM-Überwachung der Box aktiviert wird. Dies kostet zusätzlich € 5,-/Monat. Export im .csv oder .xls-Format.

# Übersicht Funktionen der Aufbewahrungsbox

Modell	Rotaid „24/7 Connected Cabinet“	
SIM-Überwachung	nicht aktiviert	kostenpflichtig aktivierte Zusatzfunktion
wetterfest IP56, bis -10°C, Nebel, Salz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Deckel 5mm Polycarbonat, UV-stabilisiert, schlagfest IK10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
sicherer elektrischer Betrieb, 24V an der Box (230 V am Trafo)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
automatisches Heizsystem, selbst-abschaltend, 24V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stromverbrauch	ca. 150-160 kW/Jahr	ca. 150-160 kW/Jahr
Alarm beim Öffnen des Deckels	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Optionen: aus/85dB/95dB
Lautstärke Alarm konfigurierbar?	-	<input checked="" type="checkbox"/> (Cloud)
Beleuchtung konfigurierbar?	-	<input checked="" type="checkbox"/> (Cloud)
leuchtet	grüne LEDs = geschlossen blinkende rote LEDs = offen	grüne LEDs = geschlossen blinkende rote LEDs = offen/nicht korrekt geschlossener Deckel
Information beim Öffnen?	akustischer Alarm an der Box	akustischer Alarm an der Box + <input checked="" type="checkbox"/> SMS und/oder E-Mail nach 5 Sek.
Information beim Schließen?	-	<input checked="" type="checkbox"/> SMS und/oder E-Mail nach 5 Sek.
Information bei Entnahme AED?	-	<input checked="" type="checkbox"/> SMS und/oder E-Mail nach 5 Sek. <b>z.B. um beliebig viele hinterlegte (betriebliche) Ersthelfer zu alarmieren.</b>
Information bei Rückgabe AED?	-	<input checked="" type="checkbox"/> SMS und/oder E-Mail nach 5 Sek.
Information bei Störung AED?	-	<input checked="" type="checkbox"/> SMS und/oder E-Mail ...
Information bei Stromausfall an der Box?	-	<input checked="" type="checkbox"/> SMS und/oder E-Mail ...
Information bei Verbindungsproblemen der Box zur Cloud	-	<input checked="" type="checkbox"/> SMS und/oder E-Mail ...
Datenausgabe für das Medizinproduktebuch	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Datenverarbeitung DSGVO-konform?	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Anforderungen der MDR <sup>4</sup> erfüllt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Preis für Set (Box, Hinweistafel incl. Designleistungen), incl. MwSt	€ 899,-	€ 899,-
zusätzliche Kosten/Folgekosten	Stromverbrauch	Stromverbrauch + € 5,-/Monat für den SIM-Vertrag <sup>5</sup>
Laufzeit-Optionen für SIM		1, 3, 5 Jahre

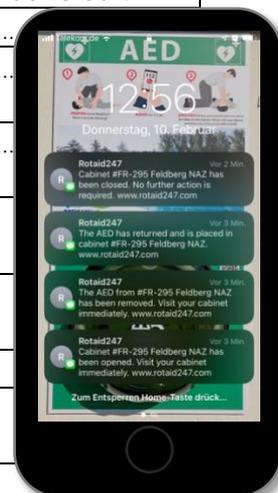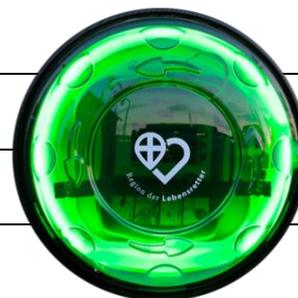

alle Preise incl. MwSt, gültig bis Ende 2024

<sup>4</sup> Medical Device Regulation (Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte, Geltungsbeginn der Verordnung: 26. Mai 2021)

<sup>5</sup> Bei 5 Jahren Vertragslaufzeit. Der Vertrag kommt mit Meßmer Medizinprodukte (www.messmer-medizintechnik.de) zustande.

<sup>6</sup> Das Design der Tafel ist vollkommen individualisierbar und wird vom Grafiker gesetzt, bis Sie zufrieden sind. Wir benötigen z.B. Ihr Logo, Gemeindewappen, einen Slogan, etc. Gerne dürfen Sie unsere Grafik „prüfen – rufen – drücken“ verwenden.

## Daten <sup>6</sup> zum Einpflegen Ihres AEDs

Modell/Typ des AEDs
AED Seriennummer (auf der Rückseite des Gerätes)
AED Garantie läuft ab am (Datum)
Klebeelektroden LOT-Nummer
Ablaufdatum der Klebeelektroden
evtl. vorhandene Ersatzklebeelektroden LOT-Nummer
evtl. vorhandene Ersatzklebeelektroden Ablaufdatum
evtl. vorhandene Klebeelektroden für Kinder LOT-Nummer
evtl. vorhandene Klebeelektroden für Kinder Ablaufdatum
Batterie LOT-Nummer
Batterie Ablaufdatum

---

<sup>6</sup> Oder schicken Sie uns einfach Fotos. Wir möchten Sie entlasten, wo es geht.

## Wer soll wie benachrichtigt werden?

In Ihrem/r Betrieb/Verein/Gemeinde sollte mindestens ein/e Ansprechpartner/in informiert werden, wenn die Box nicht korrekt geschlossen ist, Verbrauchsmaterial abläuft, die Box einen Stromausfall anzeigt, etc.

Nennen Sie uns jeden Empfänger von *push-Nachrichten* mit vollem Namen, E-Mail-Adresse und ggf. Handynummer. (Für mehrere Empfänger füllen Sie die Tabelle mehrfach aus.)

Vorname Name
E-Mail-Adresse
ggf. Handynummer

Wählen Sie für folgende Meldungen aus, wie die Benachrichtigungen für den oben genannten Empfänger ausgelöst werden sollen. Es muss mindestens eine der Optionen ausgewählt werden.

Aktion	Meldung per SMS	Meldung per E-Mail	Unsere Empfehlung für den Ansprechpartner im Betrieb/Verein/...
• Box offen/geschlossen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SMS
• AED in der Box/nicht in der Box	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SMS
• AED Status (Fehlermeldung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Stromausfall an der Box	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SMS
• Verbindung zur Cloud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Verbrauchsmaterial tauschen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E-Mail

Ihr Ansprechpartner bei Region der Lebensretter e.V. ist



Thomas Steuber  
Tel. 0761-2160665-4  
thomas.steuber@regionderlebensretter.de  
aed@regionderlebensretter.de